

## SCHEDA TECNICA REV05

RESPIRATORE FACCIALE MONOUSO TIPO FFP classe 2

Modello: **PHC+2**

### Descrizione

I respiratori facciali serie PHC+2 sono adatti a proteggere le vie respiratorie in ambienti in cui sono presenti polveri e/o particelle solide e liquide (non oil) volatili.

Caratteristiche:



*Efficienza di filtrazione  $\geq 98\%$  mediante tecnologia filtrante Puleo HC+™ in grado di fornire contemporaneamente anche prestazioni efficaci e costanti.*



*Elastici confortevoli per facilitare l'aggancio dietro le orecchie;*



*Forma del corpo mascherina molto confortevole all'atto del parlare;*



*Trattamento di disinfezione ai raggi UV-C prima del confezionamento finale;*



*Packaging singolo per garantire il massimo livello di igiene prima dell'uso;*



*Facile da vestire per chi lo indossa grazie alla linguetta per setto nasale.*

**PULEO S.p.A.**

ADDRESS

SS 115 Km 21

Fraz. Bosco, 479

91025 Marsala / Italy

[info@puleohealthcare.com](mailto:info@puleohealthcare.com)



TELEPHONE +39 0923 968284



SALES +39 349 4442447



LOGISTICS +39 345 6279687

**Cod.Fisc./P.IVA/VAT**

01233360815

**R.E.A. N.** 75992

Capitale Sociale € 1.500.000

[www.puleohealthcare.com](http://www.puleohealthcare.com)

## Normativa

### Certificazione

Le semimaschere filtranti PHC+2 soddisfano i requisiti del Regolamento (UE 2016/425) e alla norma EN 149:2001+A1:2009 (89/686/CE); devono essere usate per proteggere le vie respiratorie di chi li indossa esclusivamente da polveri e particelle solide e liquide (non oil) volatili. Questi dispositivi sono prodotti in un impianto certificato secondo la ISO 9001:2015-4.

### Marcatura

NR= Non riutilizzabile (utilizzo per un solo turno di lavoro)

D = Soddisfa i requisiti di resistenza all'intasamento

### Applicazione e Limite d'Impiego

Questi prodotti sono utilizzabili nelle situazioni e condizioni ambientali tali che la concentrazione delle sostanze contaminanti non superi il valore limite di 12 x TVL

\*TVL: Threshold Limit Value (Valore Limite di Soglia)

- *Questi prodotti sono dispositivi di protezione individuale che offrono copertura per un turno di lavoro (8 ore); prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni fornite dal produttore.*
- *Si consiglia di verificare l'idoneità di questi dispositivi, se è il caso, anche con la consulenza di un professionista della sicurezza sul lavoro, prima di utilizzarli nelle aree dove è probabile che sorgano rischi contro i quali questo prodotto è destinato a salvaguardare.*
- *Suggeriamo di indossare questo dpi prima dello svolgimento di attività per le quali sia previsto un rischio importante per le vie aeree e prima di accedere in zone nelle quali esiste il rischio di esposizione a fonti nocive e/o pericolose per la salute dell'individuo e potenzialmente esplosive.*
- *È improbabile soddisfare i requisiti relativi alla perdita di tenuta se peli del viso (barba) passano sotto la tenuta facciale.*

Prima dell'uso controllare che il prodotto sia ancora all'interno del periodo di validità dichiarato.

Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e pulito ad una temperatura compresa fra -20°C e +25°C con un'umidità relativa <80%.

## Istruzioni per l'Uso

- Questi prodotti sono dispositivi di protezione individuale usa e getta; prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni fornite dal produttore.
- Si consiglia di verificare l'idoneità di questi dispositivi, se è il caso, anche con la consulenza di un professionista della sicurezza sul lavoro, prima di utilizzarli nelle aree dove è probabile che sorgano rischi contro i quali questo prodotto è destinato a salvaguardare.
- Suggeriamo di indossare questo dpi prima dello svolgimento di attività per le quali sia previsto un rischio importante per le vie aeree e prima di accedere in zone nelle quali esiste il rischio di esposizione a fonti nocive e/o pericolose per la salute dell'individuo.

PULEO S.p.A.

ADDRESS

SS 115 Km 21

Fraz. Bosco, 479

91025 Marsala / Italy

[info@puleohealthcare.com](mailto:info@puleohealthcare.com)



TELEPHONE +39 0923 968284



SALES +39 349 4442447



LOGISTICS +39 345 6279687

Cod.Fisc./P.IVA/VAT

01233360815


R.E.A. N. 75992

Capitale Sociale € 1.500.000

[www.puleohealthcare.com](http://www.puleohealthcare.com)

**Istruzioni per l'uso di mascherine chirurgiche e respiratori filtranti**

Prima di indossare la mascherina è consigliabile lavarsi le mani

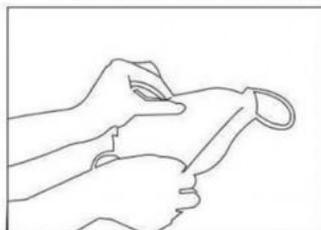

Aprire la mascherina.



Indossare la mascherina appoggiandola prima sul naso



Agganciare gli elastici dietro alle orecchie. Conformare lo stringinaso facendolo aderire ai contorni




Premere leggermente per ottenere la migliore aderenza possibile anche sulle guance e sotto il mento

**Rimuovere la mascherina evitando il contatto con la parte interna.**

**Specifiche**

CORPO RESPIRATORE	<b>5 STRATI FILTRANTI</b>
ELASTICI	<b>ELASTOMERO</b>
LINGUETTA NASALE	<b>PE+ACCIAIO ZINCATO</b>
PESO	<b>7 G</b>
IMBALLO SINGOLO	<b>1PZ IN BUSTA</b>
IMBALLO MULTIPLIO S	<b>10 PZ/CONFEZIONE</b>
IMBALLO MULTIPLIO M	<b>20 PZ/CONFEZIONE</b>
IMBALLO MULTIPLIO L	<b>50 PZ/CONFEZIONE</b>

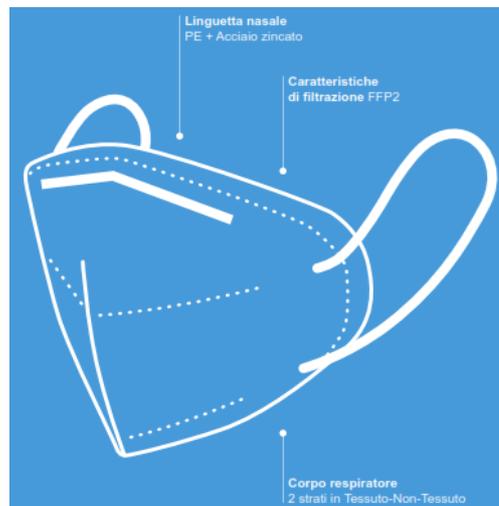

Per chiarimenti sulla scelta del dispositivo più idoneo e sulla formazione, non esitate a contattarci. Offriamo una vasta gamma di informazioni e materiale di supporto.

*Indossare una mascherina **FFP2 PHC+2** secondo le specifiche indicate e per il tempo consigliato sulla confezione, significa essere responsabili e mostrare cura non soltanto verso sè stessi ma anche verso la comunità, inficiando la diffusione del COVID-19 e rendendo la gestione dell'emergenza meno difficile.*

Al fine di migliorarne la qualità e la produzione, la Puleo S.p.A. si riserva il diritto di introdurre le eventuali modifiche necessarie al prodotto in qualsiasi occasione e senza alcun obbligo di preavviso.

**PULEO S.p.A.**

ADDRESS

SS 115 Km 21

Fraz. Bosco, 479

91025 Marsala / Italy

[info@puleohealthcare.com](mailto:info@puleohealthcare.com)



TELEPHONE +39 0923 968284



SALES +39 349 4442447



LOGISTICS +39 345 6279687

**Cod.Fisc./P.IVA/VAT**

01233360815

**R.E.A. N. 75992**

Capitale Sociale € 1.500.000

[www.puleohealthcare.com](http://www.puleohealthcare.com)