



Dispositivi medici

Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico - Tipo IIR

monouso / non-sterile



Mascherina chirurgica 3 strati

Produttore:

Xiamen Probtain Nonwoven Inc.
No. 6, Jian Road, Tong An District,
Xiamen, Fujian, China 361100

 **My Benefit**[®]
il benessere della salute

Importatore:

My Benefit Srl

Via Giacomo Leopardi, 46/a - 41123 Modena MO
www.mybenefit.it info@mybenefit.it

Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico - Tipo IIR

monouso / non-sterile

CARATTERISTICHE

Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico di Tipo II R, non riutilizzabili.


Il loro uso è consigliato laddove non sia possibile adottare la distanza minima di sicurezza anti-contagio:

- *Nell'ambiente di lavoro;*
- *In ambienti affollati o ad uso pubblico;*
- *In ambiti sanitari ed ospedalieri;*

Utilizzate principalmente per creare una barriera tra la bocca e il naso di chi le indossa, le mascherine IIR possiedono una maggiore resistenza alla proiezione (spruzzi) di fluidi corporei sulla superficie esterna rispetto al tipo I o II.

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite in un sacchettino di plastica ben chiuso all'interno del bidone della raccolta differenziate.

DETTAGLI TECNICI

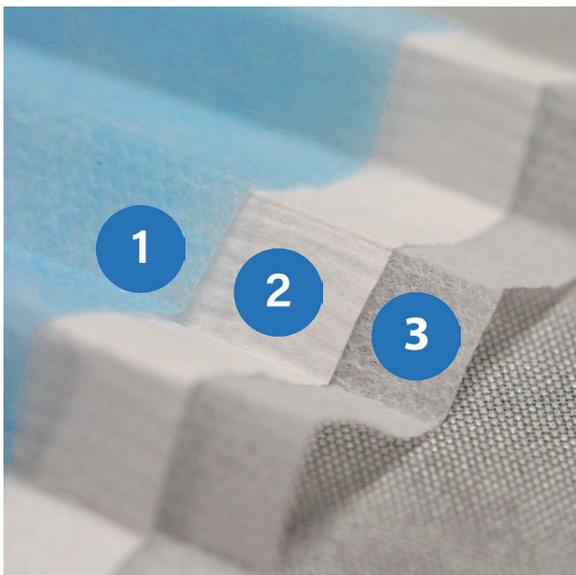

Materiale (3 strati):

- 1. Superficie esterna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto 25 g/m²
- 2. Filtro:** Polipropilene melt-blown 25 g/m²
- 3. Superficie interna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto 20 g/m²

Dimensioni: 17.5 * 9.5 cm

Tipo: Tipo II R - monouso / non sterile

Standard Filtrazione: EN 14683: 2019+AC2019

Progressivo di registrazione Dispositivo Medico: 1968967

Condizioni di conservazione: mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

Shelf life: 3 anni dalla data di produzione


FUNZIONI

Mascherine chirurgiche ad uso medico, testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti della penetrazione di saliva ed altri fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Le mascherine forniscono una protezione nei confronti della diffusione dell'influenza sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca.


Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico - Tipo IIR

monouso / non-sterile


ISTRUZIONI PER L'USO

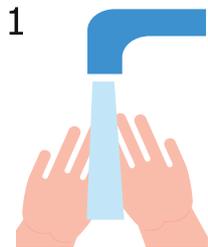

1
Lavare e igienizzare
le mani

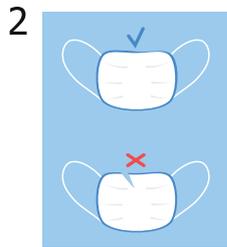

2
Controllare per la
presenza di buchi
e strappi

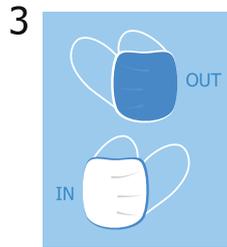

3
Indossare la maschera
dal lato corretto
(blu esterno)



4
Fissare i lacci
dietro le orecchie
fino a un' indossatura
confortevole



5
Premere col dito
sul ponte nasale
fino a un'aderenza
ottimale



6
Cambiare maschera
ogni 2/3 ore



7
Non toccare la
superficie esterna



8
Rimpiazzare la
maschera non
appena è umida



9
Disporre subito
della maschera usata
nell'indifferenziata



10
Igienizzare le mani
dopo l'uso

INDICAZIONI

Prima di utilizzare la mascherina, lavare le mani con disinfettante, alcool o sapone. Apporre alla radice del naso, spingere la mascherina sul mento e aggiustare gli elastici dietro alle orecchie fino ad un'indossatura confortevole.

Se, durante l'uso, dovesse rendersi necessario rimuovere la maschera, evitare contatto con mani / naso / bocca e la superficie esterna della maschera, per evitare possibili contagi. Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l'esterno verso il centro e disporne nei rifiuti indifferenziati richiudendola dentro un sacchetto di plastica.

La maschera è monouso, non riutilizzabile o riciclabile. Mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

IMPORTANTE

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.